


Analizadores de hematología automatizados

SERIE XN-L

Grande en el desempeño,
compacto en el tamaño.



XN-350

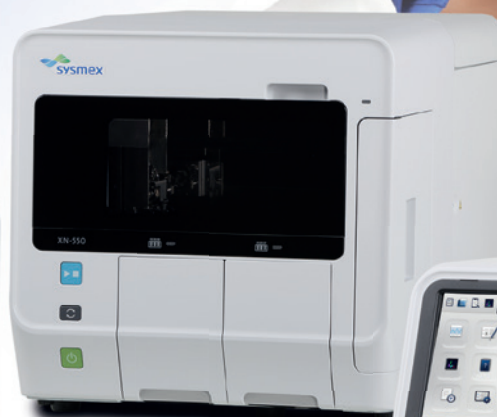

XN-550



XN-450

Revolucionando la hematología


Sysmex Serie XN-L es la más nueva serie de analizadores de hematología compactos de Sysmex totalmente automatizados con diferencial de 6 partes.

Están diseñados para satisfacer las necesidades del laboratorio de hoy proporcionando valores clínicos que sólo los modelos más avanzados antes eran capaces de proporcionar; al tiempo que mejora la eficiencia operativa en los laboratorios.

La Serie XN-L está disponible en tres modelos con diferentes modos de aspiración.

XN-550™

Muestreador que permite tanto análisis de tubo abierto y cerrado

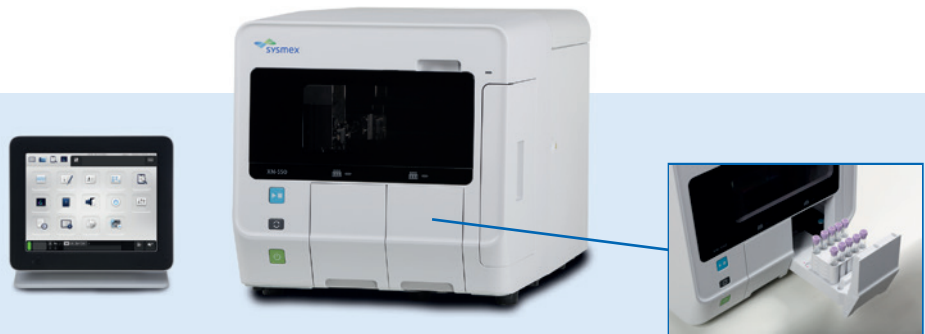

XN-450™

Análisis de tubo cerrado



XN-350™

Análisis de tubo abierto



Analizadores de hematología compactos con diferencial de 6 partes que atiende lo más importante en su laboratorio.

1 Fácil de usar



Pantalla táctil multicolor integrada con gráficas de usuario intuitiva interfaz para respaldar sus tareas de rutina.

Un sistema de gestión de reactivos que muestra la prueba y las fechas de vencimiento para permitir el seguimiento eficiente del uso de reactivo.

2 Compacto



Ahorro de espacio
Aprox. 20 cm

Diseño compacto con una computadora integrada que se adapta fácilmente a cualquier mesa de laboratorio en un espacio pequeño.

3 Flexible

Sólo 25 μ L de volumen de aspiración

Requiere sólo 25 μ l de volumen de aspiración para el modo de sangre completa y el modo de leucocitos bajos. (modo Low WBC)

Función de dispensación automática de diluyente

Función de dispensación automática de diluyente está disponible para la dilución de las muestras.

4 Conectividad extendida

- Los analizadores XN-550, XN-450 y XN-350 tienen conectividad extendida para atender las diversas necesidades de su laboratorio.
- Puerto RS-232C y el puerto LAN para la conexión con el sistema de información (LIS) de cada laboratorio.
- Cuatro puertos USB para lector de código de barras portátil, impresora y conexiones de dispositivos USB (todos los dispositivos USB son opcionales).

5 Estandarización a través de las plataformas Sysmex

Compatibilidad con la Serie-XN a través de reactivos comunes, controles y tecnología permite una consistencia en todas las operaciones del laboratorio.

A Reactivos comunes y materiales de control de calidad



Reactivos y materiales de control de calidad utilizados en la Serie-XN se pueden utilizar en la Serie XN-L.

B Interfaz de usuario uniforme



Los analizadores XN-L utilizan la misma interfaz de usuario que la Serie-XN.

C Tecnología y los parámetros clínicos idénticos



Los parámetros clínicos avanzados hacen que la Serie XN-L sea el respaldo perfecto para laboratorios 24/7.

6 Flujo de trabajo mejorado y TAT

Hasta 70 muestras / hora

Mejor TAT (tiempo de respuesta) uno de los más altos rendimientos con analizadores compactos de 6PD en el mercado.

Muestreador disponible para un sistema verdaderamente automatizado*




Cajón de la izquierda



Cajón de la derecha

Repetición automática integrada, reanálisis de la muestra y reflex de la muestra

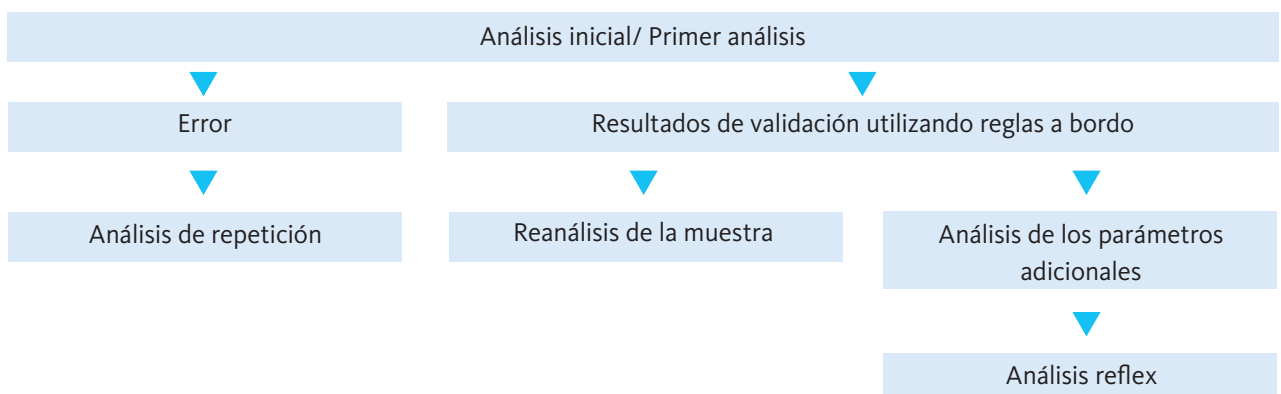

*Sólo disponible en XN-550


Más que CBC + DIFF

Tecnología central de la Serie XN-L

Los analizadores XN-550, XN-450 y XN-350 utilizan la misma tecnología de los analizadores hematológicos más avanzados, la probada y confiable tecnología de citometría de flujo fluorescente, para el conteo y análisis de células.

Después que las células son irradiadas por el rayo láser, se les analiza la dispersión de luz frontal (FSC), la dispersión de luz lateral (SSC) y la luz fluorescente lateral (SFL).

Se utilizan las tres señales para diferenciar y contar las células con la ayuda de la tecnología digital única y algoritmos.

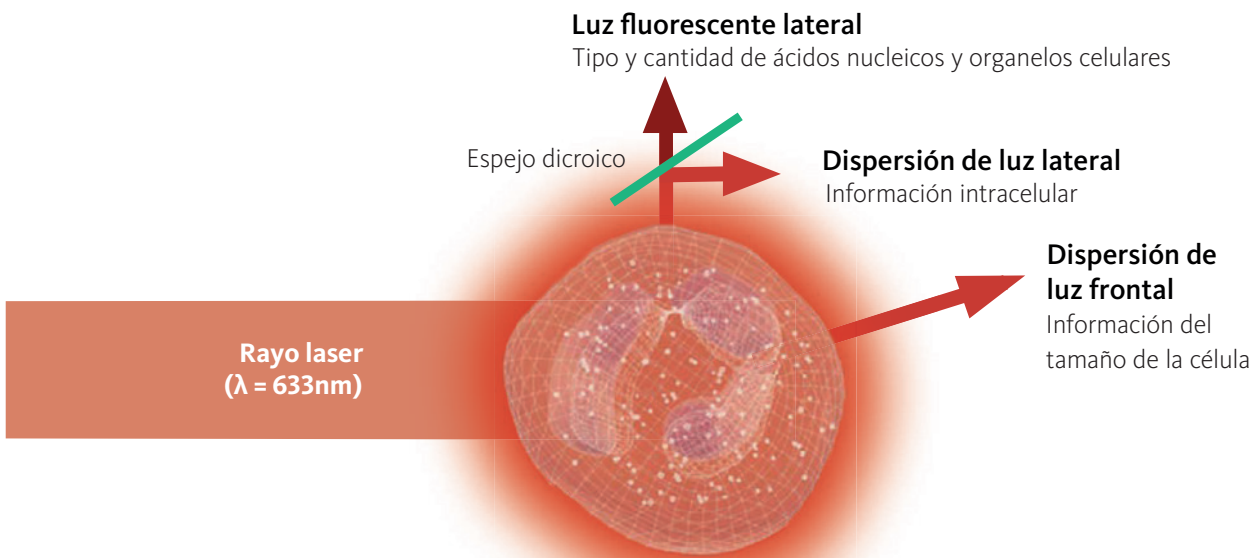


Valor Agregado
IG

Valor clínico:

Un verdadero recuento diferencial de 6 partes (IG):

Gráfica de dispersión WDF

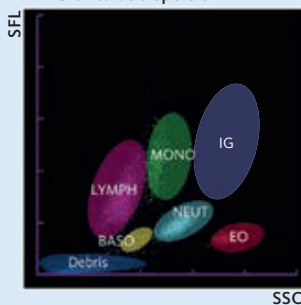

- El conteo de los granulocitos (IG) en cada análisis diferencial, ayuda en la predicción temprana de la infección e inflamación.
- No requiere reactivos adicionales.

Valor Agregado
WBC bajos

Valor clínico:

Análisis de muestras leucopénicas en el modo Low WBC*:



- Las muestras con bajos recuentos de glóbulos blancos se pueden medir con precisión mediante el recuento doble de las células; proporcionando resultados confiables que ayudan en el monitoreo de la quimioterapia.

* Opcional

Valor Agregado
Flúidos
corporales

Valor clínico:

El análisis del fluidos corporales totalmente automatizado en modo BF*:

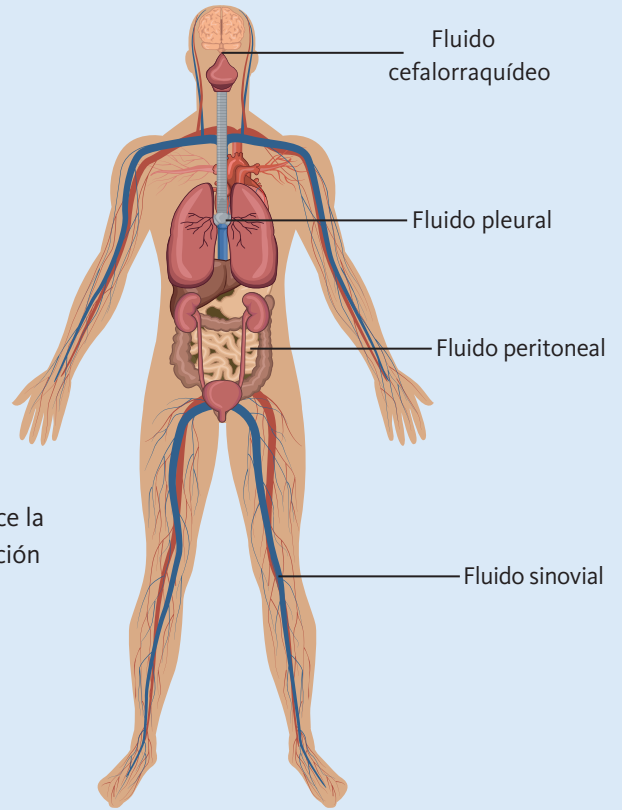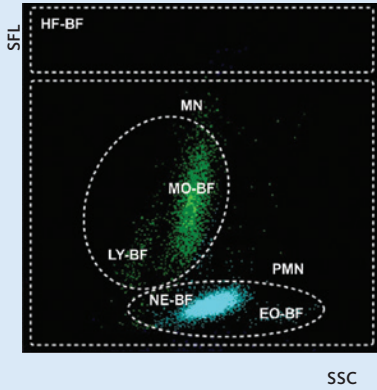


- El análisis de fluidos corporales incluye diferencial de 2 partes MN (mononucleares) y PMN (polimorfonucleares), población celular que favorece la diferenciación entre una infección viral y una infección bacteriana.
- No requiere reactivos adicionales.
- No requiere preparación especial de la muestra.

* Opcional

Valor Agregado
RET

Valor clínico:

Índices de la eritropoyesis (RET, RET-He, IRF):

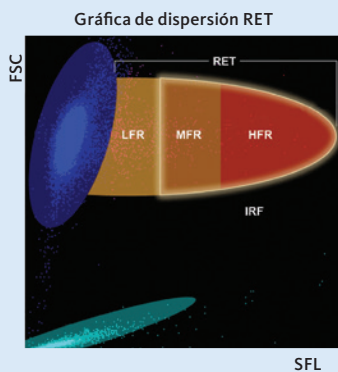

- Los parámetros RET-He (hemoglobina reticulocitaria) y IRF (fracción de reticulocitos inmaduros) favorecen el monitoreo de la producción de glóbulos rojos.
- El parámetro RET-He ayuda en la diferenciación entre la deficiencia de hierro funcional y la clásica, permite el monitoreo de EPO (Eritropoyetina) y/o terapia con hierro IV.

* Opcional

Especificaciones

Principios y tecnologías

- **Citometría de flujo fluorescente:** WBC, DIFF, RET, IRF, diferencial de 2 partes para el análisis de fluidos corporales;
- **Método de impedancia con enfoque hidrodinámico:** PLT-I, RBC, HCT;
- **Método SLS-hemoglobina libre de cianuro:** HGB.

Parámetros analizados:

- **Parámetros reportables en sangre entera y modo prediluido.**
WBC, RBC, HGB, HCT, VCM, HCM, CHCM, PLT-I, RDW-SD, RDW-CV, MPV, NEUT #, LINFO #, MONO #, EO #, BASO #, NEUT%, LINFO%, MONO%, EO%, BASO%, IG #, IG%.
- **Parámetros de investigación en sangre entera y modo prediluido.**
PDW, P-LCR, PCT
- **Parámetros reportables en el modo de fluidos corporales (opcional)**
WBC-BF, RBC-BF, MN#, PMN#, MN%, PMN%, TC-BF#.
- **Parámetros reportables en el canal de reticulocitos (opcional):**
RET#, RET%, IRF, RET-He
- **Parámetros de investigación del canal de reticulocitos (opcional):**
LFR, MFR, HFR, PLT-O

Rendimiento

- **Sangre entera:**
 - **CBC:** hasta 60 muestras por hora;
 - Hasta 70 muestras por hora con licencia *Speed-up* opcional.
 - **CBC + DIFF:** hasta 60 muestras por hora;
 - Hasta 70 muestras por hora con licencia *Speed-up* opcional.
 - **CBC + DIFF + RET:** hasta 35 muestras por hora.
- **Fluidos corporales:** hasta 30 muestras por hora.

Modo de aspiración

- **XN-550:** muestreador - análisis de tubo cerrado y abierto;
- **XN-450:** análisis de tubo cerrado;
- **XN-350:** análisis de tubo abierto.

Volumen de aspiración de muestra

- **Sangre entera / modo Low WBC:** 25 µl;
- **Modo prediluido:** 70 µl;
- **Modo de fluidos corporales:** 70 µl.

Almacenamiento de datos

- **Resultados:** 100.000 muestras;
- **Información de pacientes:** 10.000 registros;
- **Archivos de control de calidad:** 99 archivos por analizador;
- **Gráficas de control de calidad:** 300 datos por archivo;
- **Histórico de reemplazo de reactivos:** 5.000 registros;
- **Histórico de mantenimiento:** 5.000 registros.

Control de calidad

- Tres niveles de material de control de calidad para todos los parámetros;
- Dos niveles de material de control de calidad para fluidos corporales.

Dimensiones y peso (unidad principal)

- | | | |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| • XN-550: Ancho: 450 mm | Profundidad: 630 mm | Altura: 450 mm / Aprox. 53kg; |
| • XN-450: Ancho: 450 mm | Profundidad: 460 mm | Altura: 440 mm / Aprox. 36kg; |
| • XN-350: Ancho: 450 mm | Profundidad: 460 mm | Altura: 510 mm / Aprox. 36kg. |

(monitor)



- **Monitor del XN-550:**
Ancho: 267 mm Profundidad: 205 mm Altura: 240 mm / Aprox. 3 kg.

Sysmex Corporation: 1-5-1 Wakinohama-Kaigandori, Chu-ku, Kobe 651-0073, Japan - Tel. +81 (78) 265-0521 www.sysmex.co.jp

Sysmex America, Inc.: 577 Aptaski Road Lincolnshire, IL 60069, U.S.A. - Tel. +1 (847) 996-4500 www.sysmex.com/us

Sysmex do Brasil Indústria e Comércio Ltda.: Rua do Paraíso, 148 - Conj. 31 - Paraíso, São Paulo/SP - CEP 04103-000 - Brasil - Tel. +55 (11) 3145-4300 www.sysmex.com.br

Sysmex Colombia S.A.S: Calle 90 #12-28 Oficinas #11 y 16 Bogotá, Colombia - Tel. +57 (1) 658-1683 www.sysmex.com.co

Sysmex Chile SpA.: Badajoz 45, oficina 1701, Torre B, Las Condes C.P. 756 0941, Santiago, Chile - Tel. +56 (2) 2940-2369 www.sysmex.cl

Sysmex Diagnósticos México S. de R.L. de C.V.: Paseo de la Reforma #250 esq. Niza Piso 8 Colonia Juárez, México, D.F. - Tel. +52 (55) 3600-7106 www.sysmex.com.mx