

Mayo 2014

## Info News Technical Support N° 1b

Tina-quant Hb A1c Gen 3

GMMI/Part no. Lot no.  
05336163 190 687516-01

Nuevo diseño de casete. Nueva versión de aplicación

### 01

► **Introducción.**

En esta oportunidad nos ponemos en contacto con Usted para comentarle sobre un nuevo diseño en los casetes de HbA1c gen 3. Como consecuencia de este diseño es necesario actualizar la versión de la aplicación descargándola desde el cobas link. De lo contrario el nuevo casete no será reconocido por el instrumento. Verificar la nueva versión detallada en el cuadro implementación. **En particular usuarios de C501 y cobas 6000 notar que la versión para sangre entera es la coloreada**

### 02

► **Principio**

Este cambio, incorpora agua en la botella B del casete para evitar posibles condensaciones en los reactivos. Siendo este, el único motivo por el cual se realiza el cambio en el diseño. El primer lote de reactivo afectado es el 687516-01.

Mayo 2014

## Info News Technical Support N° 1b

Nuevo diseño de casete. Nueva versión de aplicación.

# 03

### ► Implementación

#### Aplicación de sangre entera.

Aplicación	HB-W3 (ACN 871)		A1 -W3 (ACN 881)	
	Version anterior	Versión actual	Version anterior	Versión actual
Analizador				
C 311	0101	0202	0101	0302
C 501	0101	<b>0402</b>	0101	0202
C 502	0101	0402	0101	0202

#### Aplicación de hemolizado.

Aplicación	HB-W3 (ACN 841)		A1 -W3 (ACN 851)	
	Version anterior	Versión actual	Version anterior	Versión actual
Analizador				
C 311	0101	0402	0101	0302
C 501	0101	0302	0101	0302
C 502	0101	0302	0101	0302

Mayo 2014

## Info News Technical Support N° 1b

Nuevo diseño de casete. Nueva versión de aplicación.

04

► **Contacto.**

### **Gerencia de Soporte Bioquímico**

Roche Professional, Molecular & Applied  
Science

Pedidos al: 011-5129-8601/8287/8572

Fax pedidos: 011-5129-8103

Servicio de Atención

Profesional (SEAP): 0810-810-5650

Fax: 011-5129-8110

Mail: [argentina.seap@roche.com](mailto:argentina.seap@roche.com)

Web: [www.roche.com.ar/](http://www.roche.com.ar/)